


**REGISTRO ANVISA: 80104140018**

## Cone de Gutta Percha Easy

O Cone de Gutta Percha é indicado para a obturação e selagem de canais radiculares durante os procedimentos endodônticos.

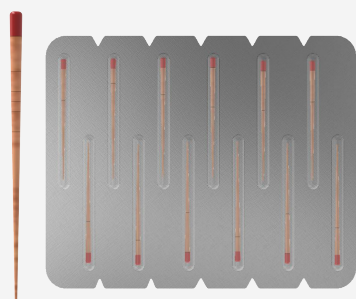

Caixa com 60 ou 120 unidades.

### Contraindicação e reações adversas:

O cone de Gutta Percha é contra indicado para pacientes que apresentam alergia conhecida à gutta percha ou a qualquer componente dos cones (óxido de zinco e sulfato de bário).

### Precauções:

- Antes de manipular qualquer dispositivo médico estéril, incluindo cones de gutta percha, os profissionais de saúde devem lavar as mãos cuidadosamente com água e sabão, o uso de luvas estéreis também é recomendado.
- Conheça a composição do cone para evitar reações alérgicas ao paciente sensíveis a qualquer componente do material.
- Manipule o cone com cuidado para evitar danos antes da inserção no canal radicular, assegurando sua eficácia.
- Após o uso, descarte a sobra do material de acordo com as regulamentações locais para evitar contaminação ambiental.
- O procedimento deve ser realizado por dentistas treinados para garantir a técnica correta e segura.
- Antes da inserção, verifique visualmente se o cone está íntegro, sem fissuras ou danos que possam comprometer sua eficácia.

### Utilização:

- Após a remoção do tecido pulpar danificado e a limpeza do canal radicular, este é preparado e modelado para receber o cone de gutta percha, o canal deve estar seco e livre de detritos.
- Selecionar um cone de gutta percha do tamanho e forma apropriados para o canal radicular, o cone deve se adaptar bem ao canal, para melhor vedamento do mesmo.
- O cone deve ser levado ao interior do canal junto com o cimento endodôntico. De acordo com a técnica obturadora escolhida pelo operador, este cone deve ser pressionado com uma pressão suave para garantir uma adaptação tridimensional às paredes do canal.
- Uma vez inserido no interior do canal junto ao cimento endodôntico de escolha do operador, o cone de gutta percha deve ser aquecido para ser cortado na entrada mais cervical da raiz.
- Após o preenchimento do canal, o dente é restaurado de acordo com a técnica escolhida pelo operador.

### Composição:

Os principais ingredientes desse produto são Gutta Percha, óxido de zinco e sulfato de bário.

**Somente para uso odontológico**

### Indicação de uso:

Ele é utilizado após o reparo do canal radicular do dente, ajudando a prevenir infecções futuras e manter a integridade estrutural do dente, ajudando a prevenir infecções futuras e a manter a integridade estrutural do dente. Ao ser inserido no canal radicular, o cone de gutta percha cria uma barreira física tridimensional, selando o espaço e evitando a entrada de bactérias e irritantes. Isso é crucial para o sucesso a longo prazo do tratamento. O material é escolhido de acordo com o tamanho e a forma do canal, garantindo um ajuste preciso.

### Princípio de funcionamento / Mecanismo de ação:

Ao ser inserido no canal radicular durante tratamento endodôntico, o cone de gutta percha cria uma barreira física ao mesmo tempo que evita a reinfecção dos canais radiculares. Devido as características físicas da gutta percha, os cones de gutta percha se plastifica e adapta às irregularidades da forma do canal vedando permanentemente o espaço radicular. Esse processo garante a entrada de bactérias e outros agentes infecciosos. Além disso, o cone de gutta percha fornece suporte estrutural ao dente tratado, mantendo sua integridade. A vedação eficaz proporcionada pelo cone de gutta percha é fundamental para o sucesso do tratamento endodôntico.

### Advertências:

O cone de gutta percha deve ser utilizado apenas por profissionais de saúde treinados e qualificados. Após o uso em um procedimento endodôntico, o cone de gutta percha deve ser descartado adequadamente de acordo com as regulamentações locais. Verifique se o cone de gutta percha está estéril e não foi violado antes do uso. Manipule o cone de gutta percha com cuidado para evitar danos ou contaminação antes da inserção no canal radicular. Conheça a composição do cone de gutta percha para evitar alergias em pacientes sensíveis a algum componente do material.

### Efeitos colaterais:

Os efeitos colaterais associados ao uso do cone de gutta percha são geralmente raros. No entanto, caso ocorra qualquer reação alérgica, é imprescindível que o profissional de saúde seja consultado imediatamente para uma avaliação aprofundada e orientações adequadas.

| CORES | PONTAS                             |
|-------|------------------------------------|
|       | #.20/03, #.20/04, #.20/05          |
|       | #.25/03, #.25/04, #.25/05, #.25/06 |
|       | #.30/03, #.30/05                   |
|       | #.35/03, #.35/05                   |
|       | #.40/03, #.40/05                   |

