

Easy Clean

STERILE

Produto esterilizado



Uso Único



2 anos após sua fabricação



Manter afastado da luz solar



Manter Seco



17°C
27°C
Temperatura de Armazenamento

REGISTRO ANVISA: 80104140006

Easy Clean

Lima de polipropileno para instrumentação rotativa.

Disponível nos tamanhos: #.25/04

Largura: 25 mm

Caixa com 12 ou 30 unidades.

Contraindicações e reações adversas:

As limas Easy Clean devem ser usadas apenas para a limpeza do canal radicular.

Precauções:

Antes do uso clínico:

- Não use velocidades alternativas que não sejam as sugeridas nestas instruções de uso.
- A reutilização de limas endodônticas pode aumentar os riscos de contaminação cruzada devido à possibilidade de uso em diferentes pacientes, quebra devido ao desgaste causado pelo uso excessivo.
- Descarte a lima Easy Clean usada em um recipiente apropriado com agulha para risco biológico.
- Não use a Easy Clean após a data de validade. O desempenho do produto pode ser inferior ao especificado.

Utilização:

- Recomenda-se o uso de um motor endodôntico com controle de torque. Velocidade recomendada: 10000 a 15000 RPM.

Composição:

A Easy Clean é feita de polipropileno PTN 4230 C.

Indicações de uso:

Recomenda-se o uso de um motor endodôntico com controle de torque.

Cuidados:

As limas Easy Clean devem ser manuseadas por profissionais qualificados. Os instrumentos devem ser esterilizados antes do uso. Este produto contém polipropileno e não deve ser usado por pessoas com sensibilidade alérgica conhecida a esse material.

Conexão da lima endodôntica ao contra-ângulo:

A Easy Clean deve ser conectado à peça de mão contra-ângulo para que possa ser usado corretamente. A cabeça da peça de mão contra-ângulo deve estar aberta e a trava da lima deve ser conectada por dentro.

A cabeça da peça de mão contra-ângulo deve ser travada e o operador deve verificar se ela está pronta para uso. Após o uso, a peça de mão contra-ângulo deve ser destravada e descartada.

Método de esterilização indicado:

Produto estéril, esterilizado com óxido de etileno.

Efeitos colaterais:

Não foram relatados efeitos colaterais.

Somente para uso odontológico

