

**Registro ANVISA: 80104140022****Formas de apresentação comercial do produto:**

Embalagem em blister de alumínio.

**Especificações do Dispositivo Médico:**

São indicados para limpeza dos condutos radiculares, para todos os tipos de canais radiculares com suas respectivas variações anatômicas (canais retos, curvos, amplos, atrésicos, achatados), cabendo seu uso em toda a extensão dos mesmos. Uso transitório de até 60 minutos de uso contínuo.

**Princípio de Funcionamento/ Mecanismo de Ação:**

As limas endodônticas são introduzidas no canal radicular e, por meio de movimentos de rotação e tração, promovem desbridamento e ampliação do local.

**Modo de Uso do Produto:**

- A lima endodôntica só pode ser utilizada após o processo de esterilização.
- É indicado o uso de motor endodôntico com controle de torque.
- Se for observado qualquer distorção da lâmina, deve ser descartada imediatamente.
- Nunca force a lima endodôntica apicalmente, insira a lima gentilmente e passivamente.
- Irrigar o canal radicular frequentemente durante a modelagem/procedimento.
- Descarte as limas endodônticas usadas em um recipiente apropriado para agulhas de risco biológico.
- A Easy Equipamentos recomenda uso único. A reutilização de limas endodônticas aumenta significativamente os riscos de contaminação cruzada, já que existe a possibilidade de uso em diferentes pacientes. Além disso, o reprocessamento inadequado pode levar à fratura da parte ativa da lima ou ao desprendimento desta parte do cabo, devido ao desgaste gerado pelo uso excessivo. É crucial seguir rigorosamente todos os métodos de limpeza, desinfecção e esterilização. Estes procedimentos são essenciais para garantir que a lima esteja completamente livre de qualquer tipo de microorganismo antes de ser usada novamente. O não cumprimento dessas medidas pode resultar em sérios riscos para a saúde do paciente, tornando imperativo o cuidado adequado ao reprocessar limas endodônticas.
- Não use a lima endodôntica após o prazo de validade, o produto pode ter um desempenho de trabalho inferior ao especificado.
- Prazo de validade do produto: 3 anos a partir da data de fabricação do produto.

**Condições de Armazenamento:**

A embalagem que contém o produto deve ser armazenada e mantida em local arejado, seco ao abrigo de luz e da ação de intempéries. Parâmetro de temperatura: 17°C à 27°C fora do contato direto com luz solar.

**Condições para Transporte:**

O transporte do produto deve ser feito em recipientes fechados e em condições que garantem a manutenção da identificação e a integridade da embalagem. Parâmetro de Temperatura: 17°C à 27°C fora do contato direto com luz solar.

**Condições de Manipulação:****- Métodos de limpeza e desinfecção:**

Método de limpeza - todas as peças devem passar por banho ultrassônico com água destilada por 60 minutos a 80 °C, conforme instruções do dispositivo ultrassônico. Após o banho ultrassônico, devem ser enxaguadas em água limpa. Assim que secas, as limas podem ser colocadas em sacos de papel lacradas para serem esterilizadas a vapor em autoclave.

**- Esterilização indicada:**

Utilizar esterilização a vapor na temperatura de 134°C, por 7 minutos e 1,20 kgf/cm<sup>2</sup> (1,15 atm).

**- Método de descarte:**

A lima endodôntica deve ser descartada em local adequado para descarte de infectantes perfuro cortantes em recipientes estanques, rígidos, com tampa e identificados (tipo descartex), localizados no local de sua geração.

**Advertências:**

- A solução de hipoclorito de sódio não deve ser usada como desinfetante.

- A Easy Equipamentos recomenda o uso em um único paciente pois a reutilização da lima pode aumentar os riscos de:

Contaminação cruzada, pela possibilidade de uso em diferentes pacientes.

Fratura da parte ativa ou desprendimento da parte ativa da haste do cabo, devido ao desgaste gerado pelo uso excessivo.

- As limas devem ser manuseadas por profissionais qualificados. Os instrumentos devem ser esterilizados antes do uso.


- Para obter um processo eficiente e seguro, o equipamento rotativo deve estar em conformidade com a IEC 60601-1.

- Este produto contém níquel e não deve ser usado por pessoas com sensibilidade alérgica conhecida a este material.

**Precauções:**

- Não utilizar mercadoria violada ou que apresentando avarias.

- Não use a lima endodôntica após o prazo de validade. O produto pode ter um desempenho de trabalho inferior ao especificado.

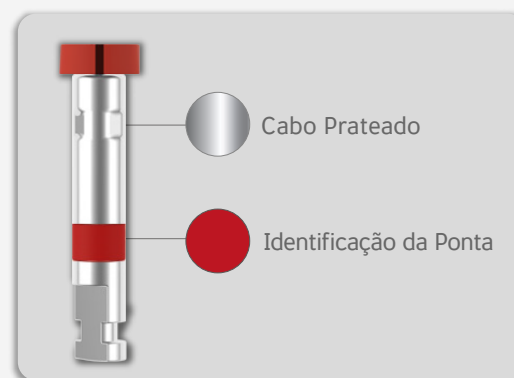

Cabo Prateado

Identificação da Ponta

**Tapers**

● #.25/06

● #.35/05

**Ângulos sugeridos: 270° para a esquerda, 30° para a direita.**