




REGISTRO ANVISA: 80104140009

Lençol de Borracha

O lençol de borracha odontológico é indicado para a contenção de salivas, sangue ou fluidos indesejáveis no local onde o procedimento odontológico está sendo realizado, fazendo com que o isolamento absoluto permita a manutenção das condições de assepsia.

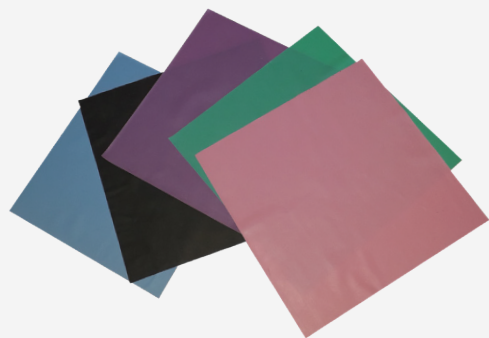

Contraindicação e reações adversas:

Contém látex natural pode causar alergia. Não utilize em pacientes que tenham relatada sensibilidade ao látex.

Precauções:

- Somente profissionais da área médica odontológica devidamente capacitados e habilitados devem fazer o uso deste produto, pois possuem informações científicas necessárias para o seu devido uso.
- Use EPI, incluindo luvas, máscaras, óculos de segurança e jalecos de mangas compridas ao manusear o produto, como é feito com todos os outros instrumentos odontológicos. Use óculos de proteção no paciente também.
- Não usar o produto se a embalagem se apresentar danificada, aberta ou molhada.
- Após a utilização o mesmo deve ser descartado evitando reutilizações mesmo que ainda contenha áreas não perfuradas não utilizadas, evitando assim o risco de contaminação cruzada.
- Proibido reprocessar.
- Seguir a legislação vigente para descarte de produtos odontológicos.
- NÚMERO DO LOTE: É importante guardar o número do lote, identificado no título do produto, para ser informado de eventuais ocorrências com o fabricante.

Utilização:

- Realize a profilaxia dos dentes a serem isolados.
- Selecione o grampo a ser utilizado, ou o amarrilho indicado para o dente (pequeno para dentes anteriores e grande para dentes posteriores).
- Monte o lençol de borracha no arco.
- Demarque e perfure o lençol de borracha na posição dos dentes a serem isolados.
- Lubrifique as bordas do orifício e coloque o grampo no orifício lubrificador ou amarrilho selecionado.
- Instale o conjunto ao dente com o auxílio de uma pinça porta grampo.

Composição:

O produto contém latex.

Somente para uso odontológico

Armazenamento:

- O produto deve ser armazenado em local arejado, seco e protegido da luz, de forma a manter as condições ideais de armazenamento e transporte, bem como sua integridade física e química.
- Mantenha o produto em sua embalagem original até o momento do uso. Inspeção a embalagem antes de usar.
- O transportador deve ser informado sobre o conteúdo. Os cuidados a serem tomados no transporte são demonstrados na embalagem, garantindo assim a proteção do produto desde o envio até a entrega ao cliente. Os pacotes não devem ser deixados à ação do tempo.

Fundamentos de seu funcionamento e ação:

O lençol de borracha odontológico é utilizado para isolamento absoluto em procedimentos odontológicos, produto fabricado em látex natural possui flexibilidade e resistência, garantindo segurança e eficácia. Separa o dente do contato com as mucosas e a língua, criando um campo operatório ideal para os diversos procedimentos em odontologia.

Efeitos colaterais:

Caso ocorra qualquer reação alérgica ao látex, é imprescindível que o profissional de saúde seja consultado imediatamente para uma avaliação aprofundada e orientações adequadas.

CORES



Azul - Preto - Roxo - Verde - Rosa

