

INSTRUÇÕES DE USO

EASYSEAL

Cimento endodôntico



Descrição do Produto

O EASYSEAL é um material para obturação de canais radiculares que funciona através da reação básica entre seus principais componentes: Óxido de Zinco e Eugenol. EASYSEAL tem como características uma boa tolerância dos tecidos, radiopacidade, impermeabilidade e fina granulação, proporcionando uma mistura homogênea, cremosa e sem grumos.

Indicação

Indicado para obturação de canais radiculares.

Apresentação

Cimento Endodôntico - Pó
01 Frasco contendo 12g
01 Colher medidora
01 Instrução de uso

Cimento Endodôntico - Líquido
01 Frasco contendo 10mL

Kit
01 Frasco de Cimento Endodôntico - Pó, contendo 12g
01 Frasco Cimento Endodôntico - Líquido, contendo 10mL
01 Colher medidora
01 Instrução de uso

Composição

Pó: Óxido de Zinco, Resina Dimerizada, Subcarbonato de Bismuto, Sulfato de Bário, Borato de Sódio e Acetato de Zinco.
Líquido: Eugenol e Óleo de Amêndoa.

Modo de Uso

- Após finalizar a instrumentação, limpar e secar os condutos radiculares;
- Selecionar o cone de guta adequado para o caso;
- Dispensar 3 gotas do líquido para 3 colheres de pó (aproximadamente 0,6g de pó) na placa de mistura previamente esterilizada;
- Espatular o produto, incorporando o pó ao líquido de forma gradativa até a obtenção de uma mistura lisa, homogênea e consistente.
- Em seguida, introduzir o cimento endodôntico no interior do canal radicular de acordo com a técnica endodôntica convencionais selecionadas.

NOTAS: O EASYSEAL é solúvel em éter, xilol e clorofórmio. A quantidade de 3 colheres de pó para 3 gotas de líquido deve ser respeitada, visando a manipulação ideal do produto, sem afetar as características físico-químicas do mesmo.

Precauções, Restrições e Advertências

Precauções

- Este produto é fabricado para ser utilizado somente conforme exposto nas instruções de uso. O uso de forma distinta da descrita nas instruções de uso são de única e exclusiva responsabilidade do profissional que a utilize.
- Evite a exposição direta do material à luz solar ou outras fontes de luz intensa
- Todo material odontológico deve ser usado somente por dentistas e laboratórios dentais autorizados.
- O Líquido contém eugenol, o qual pode causar irritação à pele, mucosa bucal e olhos.
- Em caso de contato prolongado, lavar a região afetada com abundante quantidade de água.
- Em casos mais sérios de envolvimento de olhos, procurar assistência médica.

Restrições e Advertências

- Manter fora do alcance das crianças;
- Contém Eugenol;
- PARA USO PROFISSIONAL;
- Produto de uso único;
- Proibido reprocessar;
- O descarte do produto deve ser realizado conforme o descarte de resíduos de materiais de consultório odontológico e/ou de acordo com a legislação local, assegurando sua completa descaracterização a fim de impedir sua reutilização e danos ambientais.

Contraindicações

Não há contraindicação quando o EASYSEAL é usado por um dentista de acordo com as instruções de uso. Entretanto, em pacientes que possuem histórico de alergia aos componentes deste produto, não fazer o uso. Produtos contendo óleos essenciais, como eugenol, podem causar reações alérgicas em pessoas suscetíveis. Caso exista um histórico de alergia a óleos essenciais, não fazer uso.

Prazo de validade

Sob condições adequadas de armazenamento, o EASYSEAL tem uma validade de 36 meses mesmo após aberto, desde que mantido em sua embalagem original e devidamente fechado. A data de validade, que consta nas embalagens, representa o prazo máximo para utilização do produto. Não usar após a data de validade.

Armazenamento

O EASYSEAL atende a finalidade a que se destina se acondicionado em temperatura ambiente (15°C - 30°C), em local seco, protegido da luz e do calor. O Produto deve permanecer em sua embalagem original e fechada após o uso. Evite a exposição direta do material à luz solar ou outras fontes de luz intensa. Condições inadequadas de armazenamento podem comprometer o funcionamento do produto.

