

INSTRUÇÕES DE USO

PASTA PTC

EASYSLIDE



Descrição

EASYSLIDE é um gel lubrificante hidrossolúvel a base de peróxido de carbamida que em conjunto com o hipoclorito de sódio libera oxigênio, facilitando a soltura de fragmentos pulpare e a penetração dos instrumentos de limpeza, além de auxiliar na remoção dos resíduos dentinários da cavidade pulpar durante o preparo químico-mecânico do canal radicular e prevenir contra o escurecimento do tecido pulpar.

Facilita o deslizamento das limas endodônticas e evita a sua quebra dentro dos canais.

Apresentação

EASYSLIDE - REPOSIÇÃO

01 seringa com 1g; 2g; 3g; 4g; ou 5g.

02 ponteiras aplicadoras

01 Instrução de uso

EASYSLIDE - kit

02; 03; 04; ou 05 seringas, com conteúdo de 1g; 2g; 3g; 4g; ou 5g.

02 ponteiras aplicadoras para cada seringa

01 Instrução de uso - impressa ou digital

Composição

Peróxido de Carbamida, Polissorbato 80, Polietilenoglicol.

Indicação

Auxilia no preparo químico-mecânico do canal radicular para ser utilizada alternadamente com as soluções de Hipoclorito de Sódio (Líquido de Dakin ou Líquido de Milton).

Informação Técnica

Cada componente da EASYSLIDE possui uma função: o Polietilenoglicol é o veículo e serve como transporte das substâncias, tornando viável sua associação. O veículo da formulação é uma substância graxa, dotada de capacidade detergente totalmente solúvel na água e estável mesmo em temperatura ambiente. Esta característica em ser uma substância graxa possibilita seu comportamento como lubrificante durante a instrumentação, permitindo que esta se desenvolva suave e efetivamente, mantendo o ritmo necessário. Contribui, assim, para diminuir os riscos de entorse dos instrumentos nas paredes do canal, prevenindo fraturas ou outros acidentes.

O Polissorbato 80 é um detergente que atua diminuindo a tensão superficial, permitindo que o produto se espalhe de maneira mais rápida e uniforme por toda a superfície do canal radicular, favorecendo o processo de limpeza pela facilitação da penetração das substâncias nos túbulos dentinários. Possui também propriedades umectante e emulsionantes, adsorvendo a gordura e mantendo-a em suspensão, fazendo com que sua retirada seja facilitada.

O Peróxido de carbamida reage com o hipoclorito de sódio obtendo-se uma reação entre eles. Esta reação promove a liberação de grande quantidade de oxigênio num processo de efervescência que, por ação mecânica, elimina do canal radicular para o meio exterior restos de dentina excisada pelos instrumentos, substâncias orgânicas, bactérias e produtos tóxicos.

Armazenamento

Mantenha a seringa bem fechada imediatamente após o uso. Proteja da umidade, calor e incidência da luz solar direta. Armazene o produto em temperaturas de 5°C a 30°C.

Instrução de Uso

1. Após realização da pulpectomia e determinação do comprimento de trabalho, irrigar de forma abundante a câmara pulpar com Hipoclorito de Sódio (p. e. Líquido de Dakin ou Milton).
2. Preencher a câmara pulpar com EASYSLIDE, selecionar a lima adequada (manual ou rotatória), realizar a instrumentação para remoção dos resíduos dentinários.
3. Irrigar abundantemente com Hipoclorito de sódio (p.ex. Líquido de Dakin ou de Milton).
4. Realizar aplicação da EASYSLIDE quanto for necessário.
5. Enxaguar a câmara pulpar abundantemente com água para remoção completa dos resíduos e solução de irrigação.
6. Em casos de retratamento, a EASYSLIDE pode ser utilizada em conjunto com o solvente para auxiliar a remoção da parte final do cone de guta-percha, seguindo-se os mesmos procedimentos de preparo do canal radicular.

Precauções

Remova completamente a EASYSLIDE antes da restauração do canal radicular ou curativo temporário

Promova o isolamento da área antes da utilização do produto.

Em caso de contato direto com a mucosa oral, enxaguar com água em abundância.

Em caso de contato com os olhos, enxague bem com água. Procure ajuda médica para avaliação e tratamento subsequente.

Advertência

PARA USO PROFISSIONAL

Respeite o prazo de validade. Nunca utilize o produto se estiver com o prazo de validade expirado.

Mantenha fora do alcance de crianças.

O descarte das embalagens vazias deve ser realizado de acordo com as normas para descarte dos demais materiais, produtos e embalagens de consultórios/laboratórios odontológicos.

Contraindicações

Não há contraindicações quando EASYSLIDE é utilizada por um profissional de odontologia de acordo com as instruções de uso. Entretanto, em pacientes que possuem histórico de alergia a qualquer um dos componentes, recomendamos não fazer uso ou ainda quando a técnica estipulada não puder ser aplicada.

Validade

Sob condições adequadas de armazenamento, EASYSLIDE tem uma validade de 24 meses, mesmo após aberto, desde que mantido em sua embalagem original, devidamente fechado e acondicionado de acordo com as instruções de armazenagem.

A data de validade, que consta nas embalagens, representa o prazo máximo para utilização do produto. Não usar após a data de validade.

Feche imediatamente a seringa após a utilização, para evitar oxidação da EASYSLIDE.