

# INSTRUÇÕES DE USO

## SEALTemp OBTURADOR PROVISÓRIO



### Descrição do Produto

SEALTEMP é um material para obturações provisórias, pronto para uso, livre de eugenol que endurece rapidamente na boca ao contato com a saliva. Possui grande aderência, garantindo bom isolamento marginal. Não tem efeitos prejudiciais sobre a gengiva e a polpa (produto não irritante).

#### Indicação

Indicado para preenchimento temporário de cavidades dentárias.

#### Composição

Óxido de Zinco, Sulfato de Zinco, Sulfato de Cálcio, Dióxido de Silício, Dibutilftalato, Acetato de Policloreto de Vinila, Fluoreto de Sódio, Aroma Menta.

#### Apresentação

Pote contendo 25 gramas

### Técnicas de aplicação

- 1) A quantidade necessária de SealTemp deve ser retirada do recipiente e aplicada diretamente na boca sem requerer mistura.
- 2) O endurecimento se processa sob a ação da saliva, sendo o produto um pouco desidratante durante o processo de endurecimento, o que pode causar ligeira sensibilidade à dentina.
- 3) Em casos em que as cavidades são muito profundas não é necessário preenchê-las inteiramente. Mais tarde isto permitirá retirar-se mais facilmente a massa antes do próximo tratamento. Em lugares expostos é recomendável observar um intervalo de 15 minutos ao máximo.
- 4) O tempo de cura do produto SealTemp é entre 15 e 30 minutos.

### Precauções, Restrições e Advertências

#### Precauções

- Devido a sensibilidade do produto a umidade, manter o uso do batoque e da sílica após a abertura do frasco.
- Após aberto, manter a embalagem hermeticamente fechada, pois o produto absorve umidade.
- Deve ser usado unicamente por dentistas e laboratórios autorizados.
- Manter fora do alcance das crianças.

#### Restrições e Advertências

Não há advertências quando SealTemp é utilizado por um profissional de odontologia de acordo com as instruções de uso. Entretanto, em pacientes que possuem histórico de alergia a qualquer um dos seus componentes, recomendamos não fazer uso.

### Validade

A data de validade do SealTemp é de 36 meses. A validade que consta das embalagens representa o prazo máximo para a utilização do produto. Não usar após a data de validade.

### Armazenamento e transporte

- SealTemp atende a finalidade a que se destina quando acondicionado à temperatura ambiente (15°C-30°C) em local seco, protegido de luz e do calor.
- Sob condições adequadas de armazenamento, SealTemp tem uma validade de 36 meses.

